

画像ディスクは、「専用アプリ」で参照できます。

## ■画像ディスク参照方法

①画像ディスクをDVDメディアドライブに挿入してください。

②DVDドライブをクリックし、以下をダブルクリックします。



③起動後、アプリの検査リスト画面が表示されます。  
シリーズ毎にサムネイルが表示されます。




## ④画像参照方法

検査リストからJPEGファイル、または、DICOMデータ形式にて画像を参照することができます。

## ■JPEG形式

アイコン「画像表示(Web)」をクリックすると、アプリでJPEG画像が表示されます。

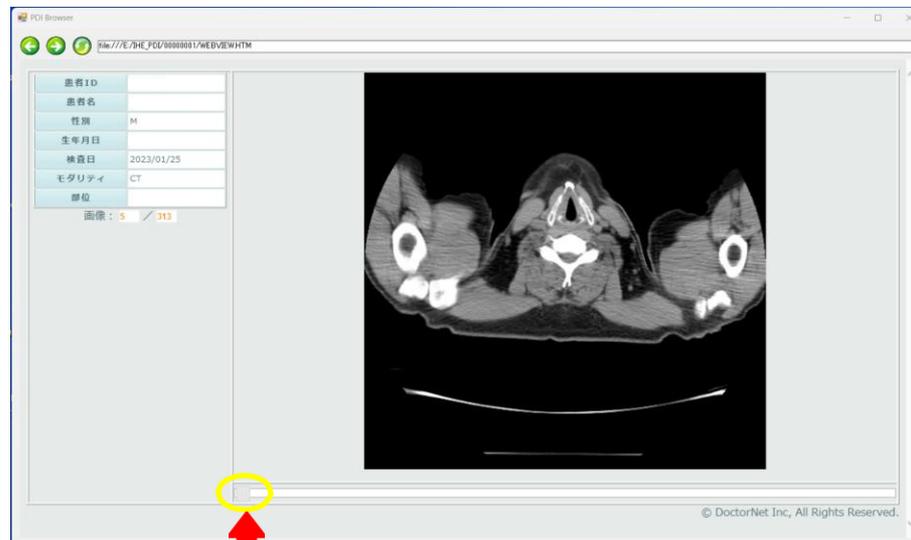


画像のスクロールは、マウスホイールの回転、または、このカーソルを左右に移動させて行います。

# 画像ディスクの参照方法について(2)

## ■DICOM形式

「画像表示(ビューア)」をクリックすると、専用ビューアでDICOM画像が表示されます。

Viewerが起動し、画像が表示されます。**若干お時間がかかります。**

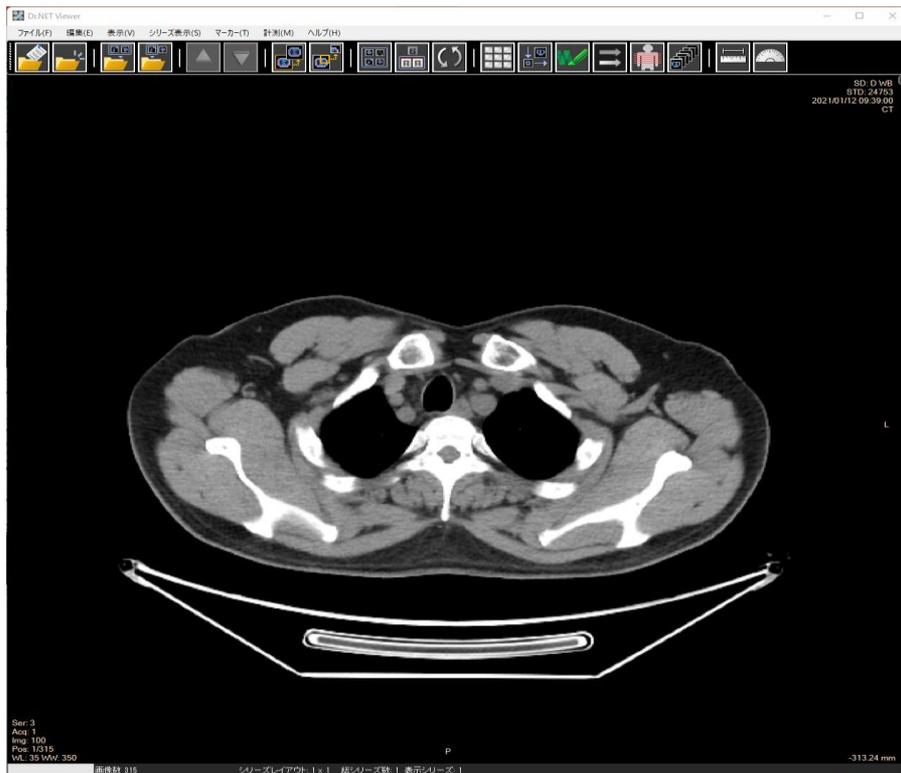



PCの環境により画像表示の速度が変わります。

画像が表示されない、操作が分からない等がありましたら、下記へご連絡ください。

お問合せ:048-658-3733 地域医療連携室

## ■ウインドウレベル調整

マウスの右ボタンを押しながら上下左右にカーソルを移動させると、コントラスト・濃度が変化します。右ボタンを離すと濃度が固定されます。

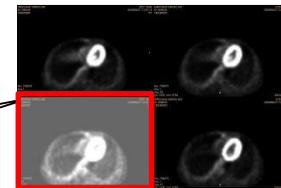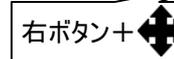

このボタンを押すと、同一シリーズ画面にウインドウレベルが反映されます。ボタンを押す直前に決定した画像濃度が設定されます。




画像のウインドウ値をデフォルトに戻します。



## ■レイアウトの調整

画面上部のメニュー ⇒ 表示 ⇒ レイアウトで変更が可能です。こちらはあらかじめレイアウトを指定して、表示させることができます。

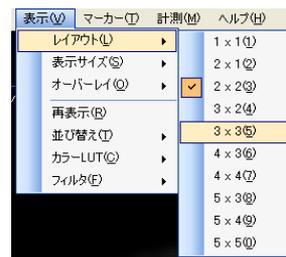


また、画面上にあるツールの「レイアウト」をワンクリックする毎に、画面の分割サイズが増えていきます。



## ■画像サイズの変更

画面上部のメニュー ⇒ 表示 ⇒ 表示サイズで表示サイズの変更を行うことができます。

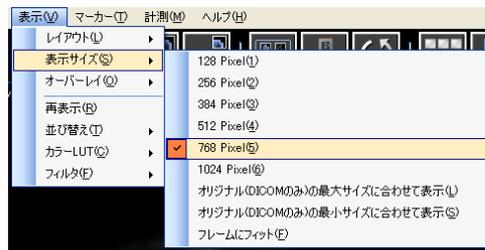

また、画面上にあるツールの「サイズ」をワンクリックする毎に、画面サイズが大きくなっていきます。

